

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО «ГЕМ»



Инструкция

по применению – контейнер для биопроб.

1. Назначение.

Для сбора, хранения и транспортировки проб медико-биологического происхождения для лабораторного исследования: мочи, кала, мокроты, биоптатов и секционного материала, ликвора и т.д.

2. Описание изделия:

Контейнеры представляют собой полые цилиндрические емкости, с завинчивающейся или захлопывающейся крышкой плоским или коническим дном. Некоторые контейнеры с внутренней стороны крышки имеют вмонтированную ложку-шпатель для заполнения твердым или полужидким материалом. Некоторые контейнеры имеют градуировку.

Контейнеры изготавливают из трех типов материалов:

- полистирол - твердый хрупкий полимер оптически чистый, плотность 1,05 г/см³, диапазон температурной устойчивости -10...+70 °С, поверхностная абсорбция воды < 0,05%; химически устойчив к маслам, спиртам, основаниям, жирам, солям, к борной, лимонной, муравьиной, плавиковой, молочной, щавелевой, салициловой, виннокаменной кислотам, перекиси водорода, фенолу, перманганату калия, триэтилен- и трипропиленгликолю, мочеvine

- полипропилен – механически прочный ригидный материал, плотность 0,91 г/см³, высоко устойчив к температурным воздействиям (от -196 °С до +121 °С), устойчив к действию химических агентов (кроме ароматических и галоген содержащих углеводов)

- полиэтилен – механически прочный пластичный материал, плотность 0,955 г/см³, диапазон температурной устойчивости от -50 °С до +80 °С, устойчив к действию концентрированных кислот и щелочей, спиртов, масел и жиров.

3. Технические характеристики.

Код товара	Наименование	Материал контейнера	Тип крышки	Объем	Ложка	Устройство для вакуумного отбора	Индивидуальная упаковка	Кол-во в упаковке	Стерильность
309202	Контейнер ПС 30 мл с коническим дном, юбкой устойчив., ПЭ крышкой	ПС	Завин.	30	-	-	-	400	-
309222	Контейнер ПС 30 мл ИУ с коническим дном, юбкой устойчив., ПЭ крышкой	ПС	Завин.	30	-	-	+	400	-
309222.О	Контейнер стерильный ПС 30 мл ИУ с коническим дном, юбкой устойчив., ПЭ крышкой	ПС	Завин.	30	-	-	+	400	ЭО
409202	Контейнер ПП 30 мл с коническим дном, юбкой устойчив., ПЭ крышкой	ПП	Завин.	30	-	-	-	400	-
409222	Контейнер ПП 30 мл ИУ с коническим дном, юбкой устойчив., ПЭ крышкой	ПП	Завин.	30	-	-	+	400	-
409222.О	Контейнер стерильный ПП 30 мл ИУ с коническим дном, юбкой устойчив., ПЭ крышкой	ПП	Завин.	30	-	-	+	400	ЭО

Код товара	Наименование	Материал контейнера	Тип крышки	Объем	Ложка	Устройство для вакуумного отбора	Индивидуальная упаковка	Кол-во в упаковке	Стерильность
409602	Контейнер ПП 30 мл с ложкой, коническим дном, юбкой устойчив., ПЭ крышкой	ПП	Завин.	30	+	-	-	400	-
309602E	Контейнер ПС 30 мл с ложкой коническим дном, юбкой устойчив., ПЭ крышкой, этикеткой	ПС	Завин.	30	+	-	-	400	-
409802	Контейнер ПП 50 мл с ПЭ крышкой	ПП	Завин.	50	-	-	-	700	-
409852	Контейнер ПП 50 мл с ложкой, ПЭ крышкой	ПП	Завин.	50	+	-	-	700	-
409826	Контейнер ПП 50 мл ИУ с ПЭ крышкой	ПП	Завин.	50	-	-	+	600	-
409402	Контейнер ПП 40 мл градуированный с ПЭ крышкой	ПП	Завин.	40	-	-	-	100	-
409426	Контейнер ПП 40 мл градуированный ИУ с ПЭ крышкой	ПП	Завин.	40	-	-	+	800	-
309402	Контейнер ПС 40 мл градуированный с ПЭ крышкой	ПС	Завин.	40	-	-	-	100	-
419802	Контейнер ПП 50 мл с контролем вскрытия, ПЭ крышкой	ПП	Завин.	50	-	-	-	700	-

Код товара	Наименование	Материал контейнера	Тип крышки	Объем	Ложка	Устройство для вакуумного отбора	Индивидуальная упаковка	Кол-во в упаковке	Стерильность
419826	Контейнер ПП 50 мл ИУ с контролем вскрытия, ПЭ крышкой	ПП	Завин.	50	-	-	+	600	-
309502	Контейнер ПС 60 мл ИУ с ПЭ крышкой плоскородной	ПС	Завин.	60	-	-	+	750	-
309552	Контейнер ПС 60 мл с ложкой, ПЭ крышкой	ПС	Завин.	60	+	-	-	600	-
309526	Контейнер ПС 60 мл ИУ с ПЭ крышкой	ПС	Завин.	60	-	-	+	600	А
409501	Контейнер ПП 60 мл с ПЭ крышкой с этикеткой (асепт. произв.)	ПП	Завин.	60	-	-	-	600	-
409502	Контейнер ПП 60 мл с ПЭ крышкой (асепт. произв.)	ПП	Завин.	60	-	-	-	600	-
409552	Контейнер ПП 60 мл с ложкой и ПЭ крышкой (асепт. произв.)	ПП	Завин.	60	+	-	-	600	-
409526	Контейнер ПП 60 мл ИУ с ПЭ крышкой (асепт. произв.)	ПП	Завин.	60	-	-	+	750	А
409526.0	Контейнер стерильный ПП 60 мл ИУ с ПЭ крышкой	ПП	Завин.	60	-	-	+	750	ЭО

Код товара	Наименование	Материал контейнера	Тип крышки	Объем	Ложка	Устройство для вакуумного отбора	Индивидуальная упаковка	Кол-во в упаковке	Стерильность
409526.1	Контейнер ПП 60 мл ИУ с ПЭ крышкой. этикеткой (асепт. произв.)	ПП	Завин.	60	-	-	+	750	A
409552G	Контейнер ПП 60 мл с ложкой и ПЭ крышкой, градуированный (асепт. произв.)	ПП	Завин.	60	+	-	-	600	-
409526G	Контейнер ПП 60 мл ИУ с ПЭ крышкой, градуированный (асепт. произв.)	ПП	Завин.	60	-	-	+	750	A
409752	Контейнер ПП 125 мл градуированный с ложкой и ПЭ крышкой	ПП	Завин.	125	+	-	-	450	-
409756	Контейнер ПП 125 мл ИУ градуированный с ложкой, с ПЭ крышкой	ПП	Завин.	125	+	-	+	350	-
409756.B	Контейнер стерильный ПП 125 мл ИУ градуированный с ложкой, с ПЭ крышкой	ПП	Завин.	125	+	-	+	350	R
309752	Контейнер ПП 150 мл со шпателем и ПЭ крышкой	ПП	Завин.	150	+	-	-	360	-
409700	Контейнер ПС 150 мл со шпателем и ПЭ крышкой	ПС	Завин.	150	-	-	-	360	R

Код товара	Наименование	Материал контейнера	Тип крышки	Объем	Ложка	Устройство для вакуумного отбора	Индивидуальная упаковка	Кол-во в упаковке	Стерильность
409701	Контейнер ПП 125 мл градуированный до 125 мл с ПЭ крышкой	ПП	Завин.	125	-	-	-	450	-
409702	Контейнер ПП 125 мл градуированный с ПЭ крышкой (асепт. произв.)	ПП	Завин.	125	-	-	-	450	-
409726	Контейнер ПП 125 мл ИУ стерильный градуированный с ПЭ крышкой	ПП	Завин.	125	-	-	+	350	A
409726.G	Контейнер ПП 125 мл ИУ стерильный градуированный с ПЭ крышкой	ПП	Завин.	125	-	-	+	400	R
409703	Контейнер ПП 125 мл градуированный до 125 мл с ПЭ крышкой (по отдельности)	ПП	Завин.	125	-	-	-	620	-
409511	Контейнер ПП 60 мл синий с ПЭ крышкой, этикеткой	ПП	Завин.	60	-	-	-	600	-
409711	Контейнер ПП 125 мл синий с ПЭ крышкой, этикеткой	ПП	Завин.	150	-	-	-	450	-
409902	Контейнер ПП 200 мл градуированный с ПЭ крышкой	ПП	Завин.	200	-	-	-	275	-

Код товара	Наименование	Материал контейнера	Тип крышки	Объем	Ложка	Устройство для вакуумного отбора	Индивидуальная упаковка	Кол-во в упаковке	Стерильность
309903	Контейнер ПС 200 мл с ПЭ крышкой	ПС	Завин.	200	-	-	-	300	-
408702	Контейнер ПП 125 мл градуированный с ПЭ крышкой с устройством для вакуумного отбора мочи	ПП	Завин.	125	-	+	-	475	-
408726	Контейнер ПП 125 мл ИУ градуированный с ПЭ крышкой с устройством для вакуумного отбора мочи	ПП	Завин.	125	-	+	+	350	-
408702.G	Контейнер стерильный ПП 125 мл градуированный с ПЭ крышкой с устройством для вакуумного отбора мочи	ПП	Завин.	125	-	+	-	250	R
408726.G	Контейнер стерильный ПП 125 мл ИУ градуированный с ПЭ крышкой с устройством для вакуумного отбора мочи	ПП	Завин.	125	-	+	+	350	R
202840	Контейнер ПП 20 мл гистологический с ПЭ крышкой	ПП	Завин.	20	-	-	-	1000	-

Код товара	Наименование	Материал контейнера	Тип крышки	Объем	Ложка	Устройство для вакуумного отбора	Индивидуальная упаковка	Кол-во в упаковке	Стерильность
202841	Контейнер ПП 40 мл гистологический с ПЭ крышкой	ПП	Завин.	40	-	-	-	600	-
202842	Контейнер ПП 60 мл гистологический с ПЭ крышкой	ПП	Завин.	60	-	-	-	500	-
202843	Контейнер ПП 80 мл гистологический с ПЭ крышкой	ПП	Завин.	80	-	-	-	400	-
202848	Контейнер ПП 90 мл гистологический с ПЭ крышкой	ПП	Завин.	90	-	-	-	300	-
202844	Контейнер ПП 120 мл гистологический с ПЭ крышкой	ПП	Завин.	120	-	-	-	300	-
202845	Контейнер ПП 250 мл гистологический с ПЭ крышкой	ПП	Завин.	250	-	-	-	100	-
202846	Контейнер ПП 500 мл гистологический с ПЭ крышкой	ПП	Завин.	500	-	-	-	200	-
202847	Контейнер ПП 1000 мл гистологический с ПЭ крышкой	ПП	Завин.	1000	-	-	-	100	-
410056	Контейнер ПП 50 мл с захлопывающейся крышкой, с контролем вскрытия, ИУ (79,3 x 30,9 мм)	ПП	Захлоп.	50	-	-	+	800	-

Код товара	Наименование	Материал контейнера	Тип крышки	Объем	Ложка	Устройство для вакуумного отбора	Индивидуальная упаковка	Кол-во в упаковке	Стерильность
410046	Контейнер ПП 50 мл с захлопывающейся крышкой, с контролем вскрытия	ПП	Захлоп.	50	-	-	-	800	-

ПП-полипропилен, ПС-полистирол, ПЭ-полиэтилен, Завин. - завинчивающаяся крышка, Захлоп. - захлопывающаяся крышка, R - стерилизовано радиацией, А – асептические, ЭО – стерилизованы Этиленоксидом.

4. Противопоказания к применению.

При использовании изделий по назначению и в соответствии с данной Инструкцией противопоказаний и ограничений в применении нет.

5. Подготовка изделия к работе.

Изделия полностью готовы к работе и дополнительной подготовки перед использованием не требуют.

6. Меры предосторожности.

Хранить вдали от огня и источников тепла.

Не использовать после истечения срока годности или если упаковка повреждена.

Не использовать не по назначению.

Хранить в сухом прохладном месте, при постоянной температуре.

Утилизация: использовать соответствующие средства индивидуальной защиты и действовать в соответствии с действующими нормами.

7. Порядок работы изделия.

При отборе материала на лабораторное исследование, не требующее соблюдения стерильных или асептических условий:

- выбрать контейнер в соответствии с объемом образца и целью исследования

- вскрыть крышку контейнера и поместить пробу внутрь (для твердых и полужидких образцов использовать ложку-шпатель)
- тщательно закрыть крышку, поместить контейнер в переноску и транспортировать в лабораторию.

При сборе мочи на анализ по Нечипоренко:

- собирают утреннюю мочу у подготовленного соответствующим образом пациента
- вскрыть контейнер, начать мочеиспускание в унитаз и через 2-3 сек. подставить контейнер для сбора анализа
- наполнить контейнер примерно на $\frac{3}{4}$
- плотно закрыть контейнер с пробой и промаркировать образец.

При отборе биоптатов, органов и секционного материала:

- выбрать контейнер с усиленной резьбой или контейнер типа «ведро», по объему соответствующий размеру образца
- на $\frac{1}{2}$ объема заполнить контейнер соответствующим фиксатором, плотно закрыть крышку
- транспортировать контейнер с фиксатором к месту отбора материала
- взятый образец поместить в контейнер с фиксатором и плотно закрыть крышку.

8. Правила хранения

Хранение изделий производится в упаковке предприятия изготовителя в сухом прохладном помещении. Избегать значительных колебаний температуры во время хранения.

- 9. Срок годности:** для стерильных изделий - 5 лет, для нестерильных - без срока годности.

Производитель:

Deltalab, S.L. Plaza de la Verneda, 1 Polígono Industrial La Llana P.O. Box 195
08191 Rubí (Barcelona) Spain. Телефон: +34 93 699 50 00, Факс: +34 93 699 45
12, e-mail: marketing@deltalab.es Website: <http://www.deltalab.es/>

Представитель в РФ:

ООО «ГЕМ» 127083, Россия, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12, этаж 3,
помещение XXV – комната 11. Тел./Факс: (495) 787 - 66 - 09, e-mail:
sale@hemltd.ru Website: www.hemltd.ru